

SOP - NAMEŠČANJE CELOOBRAZNE MASKE S FILTROM
PROMASK PRO 2000
VERZIJA 1.0
7. 4. 2020

1.	<input type="checkbox"/> <u>PRED UPORABO</u> PREVERI IME IN PRIIMEK NA FILTRU IN RAZPOLOŽLJIVI ČAS UČINKOVITOSTI FILTRA (UPORABA DO 100 UR)
2.	<input type="checkbox"/> <u>PREGLED MASKE</u> VZEMI ČISTO MASKO, SPROSTI VSE ZATEGOVALNE TRAKOVE
3.	<input type="checkbox"/> <u>PRIPRAVI FILTER</u> ODSTRANI OBA POKROVČKA IN FILTER PRIVIJ NA MASKO LEVA STRAN IN ZMERNO ZATEGNI!
4.	<input type="checkbox"/> <u>POKROVČKE SHRANI V VREČKO</u> VREČKO BOŠ KASNEJE UPORABIL ZA HRAMBO DEZINFICIRANEGA FILTRA
5.	<input type="checkbox"/> <u>OBLECI TYVEK PO SOP - OBLAČENJE</u> IZVEDI VSE KORAKE DO ZAPENJANJA ZADRGE IN NAMEŠČANJA KAPUCE
6.	<input type="checkbox"/> <u>NAMESTI MASKO NA OBRAZ</u> (PAZI NA DOBRO NAMEŠČENOST USTNEGA IN NOSNEGA DELA V NOTRANJI MASKI). ZATEGUJ OD SPODAJ NAVZGOR IN OB GLAVI.
7.	<input type="checkbox"/> <u>TEST TESNOSTI MASKE</u> Z ROKO NA FILTRU ZATESNI ODPRTINO IN VDIHNI – OB TEM ZRAK NE SME UHAJATI V MASKO.
8.	<input type="checkbox"/> <u>NADALJUJ Z NAMEŠČANJEM TYVEKA PO SOP - OBLAČENJE</u> NAMESTI KAPUCO, ZAPNI IN ZAŠČITI ZADRGO, PREVERI PREKRITOST NA SPOJIH
9.	<input type="checkbox"/> <u>NAMESTI 1. SLOJ ROKAVIC</u>
10.	<input type="checkbox"/> <u>NAMESTI 2. SLOJ ROKAVIC</u> ZAPESTNI DEL ROKAVICE POVLECI PREKO ROKAVOV TYVEKA IN GA KROŽNO ZALEPI.

**SOP – SNEMANJE CELOOBRAZNE MASKE S FILTROM
PROMASK PRO 2000**

VERZIJA 1.0

7. 4. 2020

PRED ZAČETKOM

Ves čas glej naravnost/navzgor predse

1.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ 2. SLOJ ROKAVIC</u>
2.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ VIZIR MASKE IN FILTER</u> UPORABI DEZINFEKCIJSKE ROBČKE OZ. IZVEDI RAZPRŠEVNAJE 70 % ALKOHOLA
3.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ 2. SLOJ ROKAVIC</u>
4.	<input type="checkbox"/> <u>V SKLADU S SOP SLECI KOMBINEZON IN 2. SLOJ ROKAVIC (ZUNANJE)</u> TYVEK ZAVRŽI V ODPADEK
5.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ 1. SLOJ ROKAVIC</u>
6.	<input type="checkbox"/> <u>SNEMI MASKO IN ODVIJ FILTER</u> MASKO ODLOŽI V VREČO ZA DEZINFEKCIJO, FILTER NA SPREDNJEM DELU POPRŠI S 70 % ALKOHOLOM, ODLOŽI FILTER NA ČISTO POVRŠINO
7.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ 1. SLOJ ROKAVIC</u>
8.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ FILTER</u> PRIMI FILTER NA NAVOJU IN GA DEZINFICIRAJ OD ZGORNJEGA DELA (NAVOJ) PROTI SPODNJEMU DELU
9.	<input type="checkbox"/> <u>FILTER – NAMESTI POKROVE IN GA SPRAVI V OZNAČENO VREČKO</u>
10.	<input type="checkbox"/> <u>ZAVRŽI ROKAVICE V ODPADEK</u>
11.	<input type="checkbox"/> <u>DEZINFICIRAJ ROKE</u>
12.	<input type="checkbox"/> <u>IZPOLNI EVIDENČNI LIST UPORABE FILTRA</u>
13.	<input type="checkbox"/> <u>CELOOBRAZNO MASKO DEZINFICIRAJ V SKLADU Z NAVODILOM ZA UPORABO</u>

EVIDENČNI LIST UPORABE FILTRA PO UPORABNIKU

GASILSKA ENOTA: _____

IME IN PRIIMEK: _____

ZAP. ŠT.	DOGODEK	DATUM	ČAS UPORABE (URE)	OPOMBE
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				